

# スクレラルレンズの洗浄方法



バイオクレンエル I  
10ml



バイオクレンエル II  
360ml



洗浄するときは、このケースを使用してください。

## STEP 1



レンズケースにレンズをセットし、バイオクレンエル II を線まで入れ、バイオクレンエル I を2、3滴入れてください。

## STEP 2



ふたを閉め、ケースを軽く振って1時間以上放置してください。

## STEP 3



ケースからレンズを取り出し、水道水で十分すすいであらってから装用してください。

## 液の出し方



バイオクレンエル I をご使用の場合は、本体底部のプッシュボタンを押してください。