

スクレラルレンズの洗浄方法



バイオクレンエル I
10ml



バイオクレンエル II
360ml




洗浄するときは、このケースを使用してください。

STEP 1



レンズケースにレンズをセットし、バイオクレンエル II を線まで入れ、バイオクレンエル I を4、5滴入れてください。

STEP 2

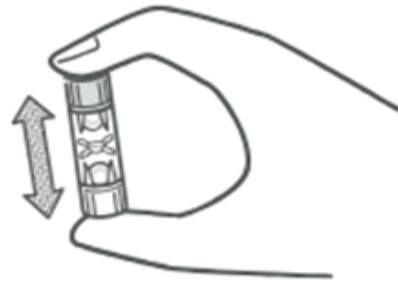

ふたを閉め、ケースを軽く振って1時間以上放置してください。

STEP 3



ケースからレンズを取り出し、水道水で十分すすいでから装用してください。

液の出し方



バイオクレンエル I をご使用の場合は、本体底部のプッシュボタンを押してください。